

ACHTUNG...



***...Plaqueeerkennung
auf den ersten Blick!***



miradent
professional prophylaxis

Plaque erkennen..

Die Ursache von Karies und Parodontitis ist der als Plaque bezeichnete Zahnbelag, eine Ansammlung von lebenden und abgestorbenen Bakterien. Dieser Belag kann nur durch mechanische Maßnahmen, wie das tägliche Putzen, entfernt werden. Oberflächlich betrachtet sehen die Zähne sauber aus und fühlen sich glatt an. Entstehende Beläge sind Anfangs nicht sichtbar.

Aber wie putze ich richtig? Putze ich gründlich und effektiv genug? Wie motiviere ich Kinder zu einer gründlichen Zahnpflege?

In den Mira-2-Ton Produkten von miradent findet man die seit Jahren bewährte Lösung. Die Plaquebildung wird durch die Darstellung in zwei Farben sehr eindrucksvoll deutlich. Ältere Plaque färbt sich blau, neuere Plaque rosa.

Fragen und Antworten

Sind die Farbstoffe im Allgemeinen gesundheitlich bedenklich?

- ✓ Für die vorgesehene Anwendung und nach derzeitigem, wissenschaftlichen Stand sind die Farbstoffe als absolut unbedenklich einzustufen.

Wie oft kann man den Test durchführen?

- ✓ Zur Selbstkontrolle kann der Patient den Test ein bis zwei mal in der Woche durchführen.

Wie kann man die Farbe im Mund entfernen?

- ✓ Durch einfaches Zähneputzen werden die Einfärbungen entfernt, wobei zudem empfohlen wird, Lippenbalsam, Vaseline oder Creme zu verwenden um ungewünschte Verfärbungen auf den Lippen zu vermeiden.

Können auch Kinder die Tabletten verwenden, gibt es Besonderheiten?

- ✓ Ja - eine halbe Tablette oder 10 ml Plaque Agent Spüllösung reichen aus.
- ✓ Die Aufsicht von Erwachsenen wird empfohlen.


..und kontrollieren



1) Benutzen Sie vor der Verwendung einen Balsam, Vaseline oder Creme um Verfärbungen zu vermeiden.



2) Die schnell einziehende Mira-2-Ton Lösung auf ein Wattestäbchen oder einen Applikator geben.

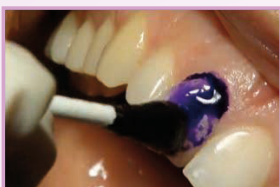

3) Tupfen Sie die zu behandelnden Flächen der Zähne ein.




4) Entfernen Sie überschüssige Lösung mit einem Sauger. Problemzonen werden bereits deutlich sichtbar.




6) Mit Wasser ausspülen.



7) Die gesamte Oberfläche der drei behandelten Zähne erfasst eine rosa Färbung, die neuere Plaque zeigt.

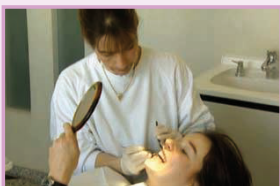

8) Zahnarzt zeigt dem Patienten die kritischen Bereiche, gefolgt von einer gründlichen Pflege und berät den Patienten in Sachen häuslicher Mundpflege.

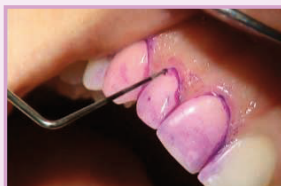

9) Blauer Zahnbelag zeigt ältere Plaque, die direkt vom Zahnarzt entfernt wird.

Mira-2-Ton®

Plaquetest

- Kautabletten oder Lösung
- Ältere Plaque wird blau, neuere rosa angezeigt
- Patientenfreundlich, motivierend
- Erythrosin-, und glutenfrei
- Einfärbungen lassen sich durch Zähneputzen wieder entfernen
- Tabletten sind leicht zu halbieren – eine Tablette reicht für zwei Anwendungen



Plaque Agent

Zahnspüllösung zur Plaquekontrolle

- Vorhandene Plaque wird blau eingefärbt
- Angenehmer „Bubble Gum“-Geschmack
- Gebrauchsfertig, motivierend, kinderfreundlich
- Einfärbungen durch Zähneputzen leicht entfernbar
- Anwendung: 1-2 x täglich vor dem Zähneputzen mit 10 ml ca. 30 Sekunden spülen
- Erythrosinfrei, ohne Alkohol
- Inkl. Dosierkappe





Artikelbezeichnung	PZN D
Mira-2-Ton Tablets Packung mit: 6 Stück	02172082
Mira-2-Ton Flüssigkeit Inhalt: 10 ml	04203651
Plaque Agent Flasche inkl. Dosierkappe, Inhalt: 500 ml	07299485
Plantana Lippen-Balsam Dose 5 g	11048547

Mit freundlicher Empfehlung von



Hager & Werken GmbH & Co. KG
 Ackerstraße 1 · 47269 Duisburg, Germany
 Telefon +49 (203) 99269-0
 Fax +49 (203) 299283
 E-Mail info@hagerwerken.de
 Internet www.hagerwerken.de

2016042105